

## Капки за очи Gelone DROPS

### Характеристика и упътване за употреба

Моля прочетете внимателно съдържанието на тази инструкция и я запазете, защото може да поискате да я прочетете отново.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Gelone DROPS са капки за очи с ефект „изкуствени сълзи“ и са предназначени за хидратиране на окото. Солното им съдържание е близко до това на човешките сълзи. Доставят се в пластмасови бутилки с обем от 10 ml и 15 ml.

#### СЪДЪРЖАНИЕ:

Gelone DROPS капки за очи е стерилен изотоничен разтвор, съдържащ натриев хлорид, калиев хлорид, натриев борат, хидроксипропилметилцелулоза.

#### УПОТРЕБА (Показания):

Овлашняващите капки за очи Gelone DROPS са медицинско изделие, предназначено за терапия на синдрома „сухо око“, възникващ при недостатъчното количество естествени сълзи.

Временно облекчава паренето и дразненето в очите, причинени от недостатъчното количество слъзен филм. Капките Gelone DROPS помагат и срещу чувството за сухота, предизвикано от недостатъчно мигане (напр. при работа с компютър или гледане на телевизия) или от неблагоприятни въздействия на заобикалящата среда (климатик, смог, вятър, цигарен дим). Консултирайте се с Вашия лекар, ако не сте убедени в причината за Вашия дискомфорт.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Пациентите, алергични към някое от веществата, изброени в състава на Gelone DROPS, не трябва да използват продукта. Рядко може да възникнат странични ефекти като чувство за „слепване на клепачите“, парене, свръхчувствителност или зачеряване. В случай на такива НЕЗАБАВНО спрете да използвате продукта и се свържете с Вашия лекар.

#### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

Наклонете глава.

Вземете отворената опаковка в ръка и с показалеца на втората ръка опънете кожата нания клепач, така че да се образува джобче между него и окото. Приближете опаковката до окото, но НИКОГА не докосвайте повърхността му. Леко натиснете шишенцето и капнете 2-3 капки от течността в конюнктивната торбичка подния клепач. Леко масажирайте конюнктивата за около 1 минута.

След употреба затворете опаковката. Съхранявайте при температура под 30 градуса. Не използвайте след изтичането на срока на годност, указан на опаковката.

#### ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

Да не се използва при чувствителност към някое от веществата.

Не допирайте апликатора-капкомер на бутилката до никакви повърхности, за да избегнете евентуално замърсяване.

Сложете капачката веднага след употреба.

Да се съхранява при температура 5 – 30 C.

Бутилката трябва да се съхранява добре затворена, когато не се използва.

Да се използва преди изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Разтворът трябва да се изхвърли 1 (един) месец след първоначалното отваряне на опаковката.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се използва индивидуално в интервал от около 15 минути с останали препарати.

**ДИСТРИБУТОР:**

ALENSA, s.r.o., Stružky 1326/6, 198 00 Прага 9, Лиценз: 27179618

**ПРОИЗВОДИТЕЛ:**

STERICON PHARMA PVT, Бенгалуру-99, Карнатака, Индия

**ОТОРИЗИРАН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ЕС:**

MYM STC, S.L., AVADA DE LOS ROSALES 32, 28935 Mostoles Madrid, SPAIN.