




Уред за измерване на PD = Междузенично разстояние

(PD = Pupillary distance = Междузенично разстояние)

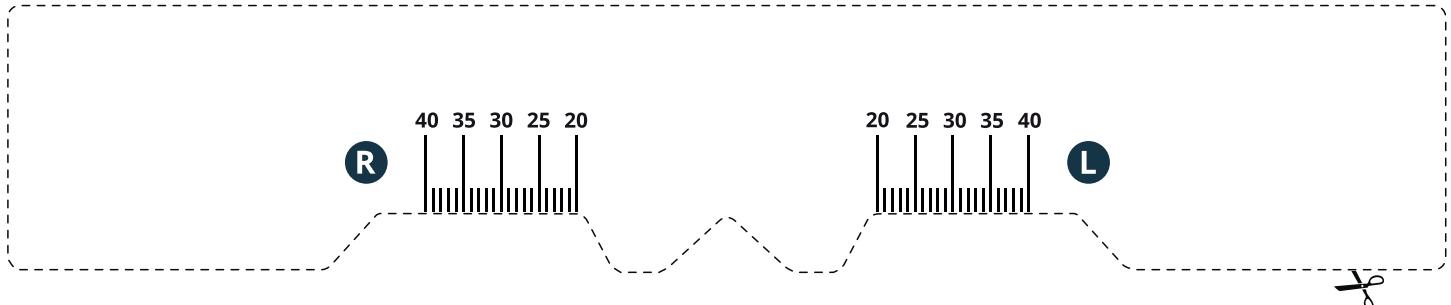

Как да измерите Вашето PD - междузенично разстояние?

1. Отпечатайте цялата страница в действителен размер (изберете настройката за печат по подразбиране или деактивирайте всякакъв вид мащабиране).
2. Използвайте истинска линийка, за да проверите дали разстоянието съответства на това от уреда за измерване. (1 см. трябва да е 1 см)
3. Изрежете измервателния уред.
4. Сега продължете с измерването на PD, както следва:
 - Поставете измервателния уред на моста над носа Ви, точно както ще носите истински очила.
 - Ако правите измерването сами, застанете пред огледалото. Погледнете право напред и отбележете позицията на всяка зеница спрямо линията, която сте принтирали.
 - Измерването е най-лесно, ако някой Ви помага. В този случай, държите измервателния уред стабилен, докато другият човек просто маркира междузеничните разстояния за дясното око (R) и лявото око (L).
 - Сега можете да изберете стойности за PD във формата за поръчка, заедно с предписаните ви диоптри, на leshti.bg

