


Уред за измерване на PD = Междузенично разстояние

(PD = Pupillary distance = Междузенично разстояние)

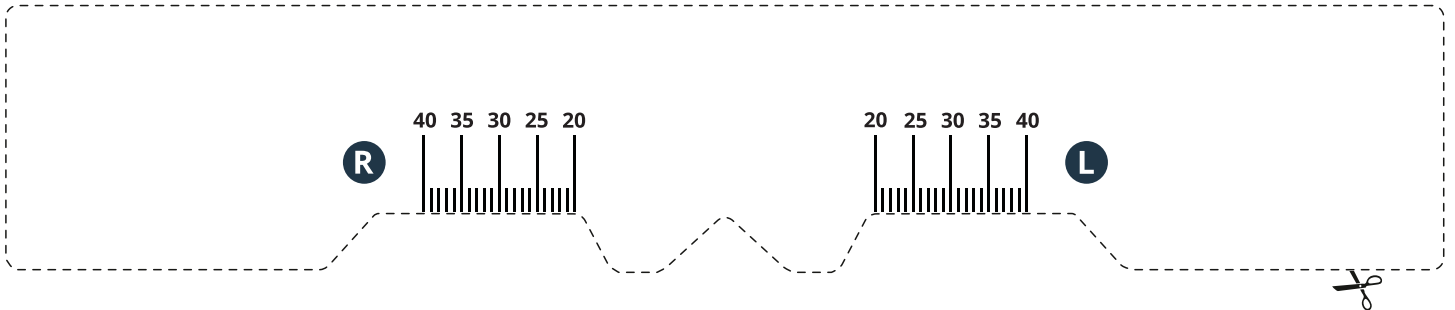

Как да измерите Вашето PD - междузенично разстояние?

1. Отпечатайте цялата страница в действителен размер.
2. Използвайте истинска линейка, за да проверите дали разстоянието съответства на това от уреда за измерване. (1 см. трябва да е 1 см)
3. Изрежете измервателния уред.
4. Сега продължете с измерването на PD, както следва:
 - Поставете измервателния уред на моста над носа Ви, точно както ще носите истински очила.
 - Ако правите измерването сами, застанете пред огледалото. Погледнете право напред и отбележете позицията на всяка зеница спрямо линията, която сте принтирали.
 - Измерването е най-лесно, ако някой Ви помага. В този случай, държете измервателния уред стабилен, докато другият човек просто маркира междузеничните разстояния за дясното око (R) и лявото око (L).
 - Сега можете да изберете стойности за PD във формата за поръчка, заедно с предписаните ви диоптри, на leshti.bg

